

# ISORAPID<sup>®</sup> Spray

Produs dezinfectant rapid pentru suprafețe cu spectru larg de activitate și conținut scăzut de alcool.



## Spectru de activitate/ Timpi de expunere

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde
Tuberculocid	60 secunde
Micobactericid	60 secunde
Levuricid/fungicid	60 secunde
Ciuperci rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri cu înveliș	30 secunde
BVDV	30 secunde
Coronavirus	30 secunde
Virusul Hepatitei B	30 secunde
Virusul Hepatitei C	30 secunde
Virusul Herpes Simplex	15 secunde
HIV	30 secunde
Virusul gripal A	15 secunde
Virusul Pseudorabiei	30 secunde
Virusul Vaccinia	15 secunde
Virusuri fără înveliș	60 secunde
Adenovirus	60 secunde
Poliovirus /Poliomavirus	60 secunde
Norovirus	5 minute
Rotavirus	15 secunde

În conformitate cu metodele standard DGHM și normele europene: EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675 și directivele RKI/DVV.

## Ambalaj

### ISORAPID® Spray

Sticlă 500 ml cu capac deschidere rapidă

Sticlă 1000 ml cu capac deschidere rapidă

Flacon 2 litri

Canistră 5 litri

### Accesorii

Pulverizator OROCLEAN® flacon 500 ml

Pulverizator OROCLEAN® flacon 1 litru

## Beneficiile utilizării acestui produs:

- **Distruge 101 microorganisme**  
Activ asupra celor mai rezistente virusuri cum ar fi poliovirus și adenovirus.
- **Activ în 60 secunde**  
Pentru dezinfectia rapidă a suprafețelor și obiectelor inclusiv a dispozitivelor medicale neinvazive.
- **Compatibil cu mai mult de 80 materiale inclusiv cu pielea artificială.**  
Produsul este recomandat în special pentru dezinfectia suprafețelor sensibile cum ar fi pielea artificială sau sticla acrilică.
- Prezintă un conținut de alcool într-un procent mai mic de 50%.
- **Nu lasă reziduuri sau pete**  
Dezinfectantul nu lasă dăre pe suprafețe nefiind necesară ștergerea suplimentară a acestora.
- **Miros de fructe**  
Fiecare utilizare a dezinfectantului degajă un miros de fructe pentru o improspătare de lungă durată a aerului.  
Disponibil în diferite tipuri de ambalaj.  
Alegeți o formă de ambalaj care se potrivește cel mai bine cu necesitățile dumneavoastră.
- **Sticlă cu dop picurător**  
Asigură dezinfectia suprafețelor fără a fi necesară pulverizarea.
- **Biodegradabil**  
Soluția este biodegradabilă și nu are un impact negativ asupra ecosistemului.
- **Testat în conformitate cu 18 norme europene**

## Descrierea produsului

ISORAPID® Spray este un produs gata preparat, fara aldehide, pe bază de alcooli pentru dezinfectia și curatarea rapida prin pulverizare și ștergere a dispozitivelor medicale neinvazive, cum ar fi mese de operatie, paturi mobile, lampi de examinare cu stativ mobil (4 roți) și scaune stomatologice. ISORAPID® Spray are un conținut scăzut de alcool, mai mic de 50%, care reduce semnificativ riscul de alergii și iritații ale pielii, mărind în același timp compatibilitatea cu materialele. ISORAPID® Spray are un parfum proaspăt, floral.

**Domeniul de utilizare: domeniul sanitar (medical), cabinete medicină dentară, veterinar, colectivități (azile, sali fitness etc.), instituții, industria farmaceutică, saloane infrumusețare/cosmetică, restaurante, hoteluri, transporturi.**

## **Aria de aplicare**

Pentru dezinfectia și curățarea rapidă prin pulverizare și ștergere a dispozitivelor medicale neinvazive cum ar fi: bancuri de laborator, scaunele de tratament, suprafețele unitului, cuvele/tăvile pentru instrumentar, piesele de mână și contrunghi, mânerul de la lămpile de examinare, instrumentarul din oțel, aluminiu, cupru, silicon și cauciuc.

## **Utilizare**

Umeziți complet suprafețele și obiectele ce vor fi dezinfectate și lăsați să acționeze. Respectați timpii de expunere. Dacă este necesar, ștergeți suprafețele și obiectele cu o lavetă curată de unică folosință. Utilizați numai pe materiale compatibile cu alcoolul. Testați înainte de utilizare pe materiale sensibile, prin aplicarea pe o zonă mică puțin vizibilă. O cantitate de 16-20 ml/m<sup>2</sup> este suficientă pentru a umezi suprafețele netede în condiții normale de temperatură 20-23°C.

## **Proprietățile produsului**

### **Proprietățile fizice și chimice**

Stare fizică: soluție limpede care nu este vâscoasă

Culoare: Incolor

Parfum: alcoolic, floral

Valoare pH: Neutră

Valabilitate: 48 luni

### **Compoziția chimică la 100 grame**

20 g etanol, 28 g 1-propanol , 0.1 g compuși cuaternari de amoniu

## **Pericol**

H226 Lichid și vapori inflamabili. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H336 Poate provoca somnolență sau amețeală. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P233 Păstrați recipientul închis etanș. P261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. P280.2 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501.1 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

## **Compatibilitate**

### **Compatibilitatea cu materialele**

Polietilenă	Compatibil.
Polipropilenă	Compatibil.
Polietrafluoetilenă	Compatibil.
Cauciuc siliconat	Compatibil
Cauciuc	Compatibil.
Clorură de polivinil	Compatibil
Sticlă acrilică	Compatibil cu restricții