



# ISORAPID® OP-Forte AF

Dezinfectant concentrate pentru dezinfectarea și curățarea dispozitivelor medicale non invazive cu suprafețe sensibile.



## Scopul Propus



ISORAPID® OP-Forte AF este un produs concentrat dezinfectant cu efect delicat dar cu acțiune puternică, pentru dezinfectarea și curățarea dispozitivelor medicale neinvazive cu suprafețe sensibile, cum ar fi echipamentele de radiologie. ISORAPID® OP-Forte AF are un parfum de fructe și este compatibil cu sticla acrilică, policarbonat (PC), și PVC. Nu conține aldehide, fenoli și potasiu caustic.

## Domeniu de utilizare



Produsul este destinat utilizării de către profesioniștii din domeniul stomatologiei sau sănătății, care au cunoștințe specifice despre dezinfectarea dispozitivelor medicale. Produsul nu trebuie utilizat direct pe pacienți.

## Instrucțiuni de utilizare



Pentru protecția dumneavoastră, purtați un halat de laborator, mănuși de unica folosință și ochelari de protecție. Pregătiți soluția de lucru conform tabelului de dozare. Ștergeți complet sau imersați complet suprafața dispozitivului medical care trebuie dezinfectat și lăsați să acționeze. Respectați timpul de contact. Dacă este necesar, uscați suprafața cu o cârpă curată de unică folosință. Înainte de prima utilizare, testați compatibilitatea materialului aplicând dezinfectantul pe o mică zonă neobservabilă. O listă a materialelor compatibile și incompatibile este disponibilă pe site-ul nostru. Dacă nu sunteți sigur cu privire la compoziția materialului dispozitivului medical, contactați producătorul înainte de utilizare. Toate accidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul medical ar trebui raportate producătorului sau autorității competente.

## Atentionare




NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL. Nu se utilizează cu dispozitive medicale invazive. Nu se amestecă cu alte produse. Asigurați-vă că orice urma de contaminare a fost îndepărtată de pe suprafața obiectului înainte de a aplica dezinfectantul.

## Manipulare



H315 Provoacă iritarea pielii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P332+P313 În caz de iritare a pielii, consultați medicul. P362 Scoateți îmbrăcăminte contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. P391 Colectați scurgerile de produs. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Fișa de date de siguranță disponibilă pe site-ul nostru.

## Depozitare

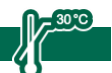

Depozitați într-un spațiu răcoros, uscat și bine ventilat. Feriți de expunerea directă la soare, căldură și flacără deschisă. Temperatura de depozitare: < 30°C.



## Proprietati fizice

Stare fizica: lichid limpede, usor vascos	Valuare pH: 6.0-8.0
Culoare: Verde	Termen de valabilitate: 36 luni (recipient ne-deschis)
Miros: Lamaie	

## Compozitie in 100 g



100 g conțin 10 g de compuși de amoniu cuaternar, auxiliare și apă.

## Spectru de eficienta



Bactericid	EN 13727:2012+A1:2013* EN 16615:2015^	1% in 1 min
Levuricid	EN 13624:2013* EN 16615:2015^	1% in 1 min
Virsi cu invelis	EN 14476:2013+A1:2015*	1% in 5 min
Virucid limitat	EN 14476:2013+A1:2015^	2% in 5 min

^ Testat cu incarcatura organica scazuta / \* Testat cu incarcatura organica ridicata

## Tabel Dozare



	 Concentrat	+	 Apa	 Timp
2%	20 ml	+	980 ml	5 min

## Compatibilitate



Polimer de acetat	Compatibil
Sticla acrilica	Compatibil
Stiren butadiene acrilonitril	Compatibil
Aluminiu	Compatibil cu restrictii
Piele artificial	Compatibil
Policlorura de polivinil clorurata	Compatibil
Poliamida	Compatibil
Tereftalat de polibutilena	Compatibil
Policarbonat	Compatibil
Polieterimid	Compatibil
Polietilena	Compatibil
Tereftalat de polietilena	Compatibil
Oxizi de polifenilen	Compatibil
Sulfon polifenil	Compatibil
Polipropilena	Compatibil



Polistiren	Compatibil
Polisulfona	Compatibil
Clorura de polivinil	Compatibil
Fluorura de polivinilidena	Compatibil
Silicon	Compatibil
Elastome Termoplastic	Compatibil
Poliuretan thermoplastic	Compatibil
Polietilena cu greutate molecular foarte mare	Compatibil

## Ambalaj






CH-010005	Flacon 250ml
CH-010059	Flacon 1L
CH-010060	Flacon 2L
CH-010065	Canistra 5L

## Producator, Reprezentant UE, Importator, Distribuitor



Oro Clean Chemie AG • Allmendstrasse 21 • 8320 Fehraltorf • Switzerland

 [info@oroclean.com](mailto:info@oroclean.com) •  +41(0)44 226 44 44 •  [www.oroclean.com](http://www.oroclean.com)



Oro Clean Chemie s.r.o • Vinohradská 2828/151 • Žižkov • 130 00 Praha 3 • Czech Republic

 [info@oroclean.cz](mailto:info@oroclean.cz) •  [www.oroclean.cz](http://www.oroclean.cz)