

DENTIRO® Foam

MARCAJ CE 1250

Spumă dezinfectantă gata preparată pentru curățarea și dezinfecția suprafețelor și materialelor sensibile

Utilizat pentru curățarea și dezinfecția dispozitivelor medicale cu suprafețe sensibile (componente din plastic) și scaune de tratament, mese de examinare și alte echipamente similare. Formula non-agresivă protejează suprafețele sensibile, cum ar fi cele din PVC. Produsul DENTIRO® Foam este ușor biodegradabil.

MOD DE UTILIZARE

Se aplică prin pulverizare și ștergere a spumei rezultate de pe suprafața ce urmează a fi curățată și dezinfectată.

1. Apăsați pe dispozitivul de pulverizare și aplicați spuma rezultată pe zonele ce urmează a fi dezinfectate.
2. Utilizați o lavetă uscată de unică folosință pentru a răspândi uniform spuma, lăsați să acționeze apoi ștergeți suprafețele până se usucă.
3. Se recomandă utilizarea zilnică sau de două ori pe zi.
4. Produsul este compatibil cu 210 materiale inclusive pielea artificială ca de ex.: Polietilenă, poliopropilenă, clorură de polivinil, sticlă acrilică, cauciuc.

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde
Tuberculocid	60 minute
Micobactericid	60 minute
Levuricid	60 secunde
Levuri rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri cu înveliș	30 secunde
BVDV	30 secunde
Virusul Hepatitei B	30 secunde
Virusul Hepatitei C	30 secunde
Virusul Herpes simplex	30 secunde
HIV	30 secunde
Virusul Gripal A	30 secunde
Virusul Vaccinia	30 secunde
Virusuri fără înveliș	60 minute
Adenovirus	60 minute
Poliovirus	60 minute
Rotavirus	30 secunde

Testat conform metodelor standard DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, directivele RKI / DVV .

FRAZE DE PERICOL: H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRUDENȚĂ: P273 – Evitați dispersarea în mediu. P305+P351 – În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

P501– Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Folosiți mănuși de protecție. Nu clătiți.

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE!