

DENTIRO® Zero

MARCAJ CE 2460

Dezinfectant-detergent gata preparat, rapid, fără alcool
Nu conține aldehide sau fenoli!

Utilizat prin pulverizare sau ștergere pentru dezinfecția suprafețelor sensibile la alcool, inclusiv din piele naturală sau artificială, cauciuc și a suprafețelor sensibile din piele artificială, sticlă acrilică (tip Plexiglas®), plastic sensibil cum ar fi PVC moale sau cauciuc, a suprafețelor mici, mobilierului din salon (scaune, măsuțe, chiuvete, bazine pedichiură), accesoriilor manichiură/pedichiură/frizerie ce nu sunt contaminate cu sânge sau materii organice.

MOD DE UTILIZARE

Se aplică prin pulverizare ca spray sau prin impregnarea șervețelelor uscate DRY WIPES MAXI SOFT.®

Desigilați capacul recipientului și/sau aplicați pompa pulverizatoare.

- Umeziți complet suprafața sau obiectul ce urmează a fi dezinfectat și lăsați substanța să acționeze (urmăriți timpii de expunere).
- Dacă este necesar, ștergeți suprafața sau obiectele cu un șervețel de unică folosință.
- Dispozitivele medicale ce intra în contact direct cu pielea și sunt dezinfectate în mod regulat cu Dentiro® Zero, trebuie să fie șterse o dată pe zi cu o lavetă umezită cu apă pentru a preveni acumularea de produse biocide pe suprafața lor.

Bactericid	60 secunde
Bacterii rezistente la antibiotice	60 secunde
Tuberculocid/micobactericid	60 minute
Levuricid	60 secunde
Levuri rezistente la antibiotice	60 secunde
Virusuri cu înveliș	15 secunde
BVDV	15 secunde
Coronavirus	15 secunde
Virusul Hepatitei B/C/ Herpes simplex/HIV	15 secunde
Virusul gripal A/vaccinia	15 secunde
Virusuri fără înveliș	30 minute
Rotavirus	30 secunde
Adenovirus	30 minute
Poliavirus/Norovirus	60 minute

În conformitate cu normele EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14563, EN 16615.

Niciun cuvânt de avertizare conform Regulamentului (CE) 1272/2008.

FRAZE DE PERICOL: H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FRAZE DE PRUDENTĂ: P273 – Evitați dispersarea în mediu. P305+P351+P338 – În caz de contact cu ochii: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

P501 – Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare. Pentru mai multe informații consultați Fișa cu Date de Securitate disponibilă pe website.

➤ **Beneficiile dumneavoastră:**

dezinfectantul fără conținut de alcool este indicat pentru aplicarea pe suprafețele sensibile.

Timp scurt de acțiune. Acționează în 60 secunde asupra bacteriilor, ciupercilor și virusurilor cu înveliș.

Nu conține coloranți ceea ce reduce semnificativ riscul de producere al alergiilor.

Este testat în condiții dificile: dezinfectantul rămâne eficient în prezența unui grad ridicat de contaminare cu materie organică cum ar fi sânge sau alte fluide ce provin din corpul uman.

Soluția este biodegradabilă și nu produce un impact negativ asupra ecosistemului.

➤ **Compatibil cu 210 materiale cum ar fi: polietilenă, polipropilenă, clorură de polivinil, sticlă acrilică, cauciuc siliconat, oțel**

➤ **Folosiți mănuși de protecție. Citiți instrucțiunile înainte de folosire!**

◆ **SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE.**