

DENTIRO WIPES – INACTIVEAZĂ 101 MICROORGANISME – MARCAJ CE 2460

Șervețele impregnate cu soluție dezinfectantă, parfumată, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfecția instrumentarului și accesoriilor manichiură/pedichiură/frizerie: forfecuțe, clești, brice, pensete, perii piepteni, etc. (ce nu sunt contaminate cu sânge sau materii organice), suprafețelor mici ale mobilierului (scaune, măsuțe, etc.) instalațiilor sanitare, aparaturii.

Produs testat în condiții de murdărie/încărcătură proteică crescută, eficient chiar și în prezența contaminării ridicate cum ar fi sângele sau alte fluide organice.

MOD DE UTILIZARE

Decupați rezerva și introduceți-o în cutie.

Scoateți primul șervețel prin orificiul din capac sub formă de stea și aplicați capacul pe cutia de șervețele.

Trageți șervețelele din cutie în lateral.

Asigurați-vă că toate obiectele ce urmează să fie dezinfectate sunt complet umezite.

Se lasă dezinfectantul să acționeze:

Spectru și timpi de acțiune:

| | |
|--------------------------------------------|------------|
| Bactericid, levuricid | 60 secunde |
| MRSA (Bacterii rezistente la antibiotice) | 60 secunde |
| Ciuperci rezistente la antibiotice | 60 secunde |
| Tuberculocid /micobactericid | 60 secunde |
| Virusuri cu înveliș | 15 secunde |
| BVDV/virusul diareei virale bovine | 15 secunde |
| Coronavirus/Virusul Hepatitei B/HIV | 15 secunde |
| Virusul Hepatitei C/Herpes simplex | 15 secunde |
| Virusul gripal tip A | 15 secunde |
| Virusul Vaccinia | 15 secunde |
| Virusuri fără înveliș- activitate virucidă | 60 secunde |
| Adenovirus | 60 secunde |
| Norovirus/Poliovirus | 60 secunde |
| Rotavirus | 30 secunde |

Conform Normelor europene, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615 și directivele RKI/DVV –testat dermatologic.

Înainte de utilizare testați pe materialele sensibile prin aplicarea pe o suprafață mică, discretă.

Conținutul scăzut de alcool mai mic de 50% asigură o foarte bună compatibilitate cu materialul și pielea și reduce potențialul alergen.

Compatibilitate cu materiale: polietilenă, PTFE, polipropilenă, cauciuc siliconat, cauciuc, PVC, sticlă acrilică, fontă, aluminu, aluminu la temperaturi ridicate.

Nu clătiți. Închideți cutia după fiecare utilizare. Folosiți mănuși de protecție.

Ușor biodegradabil. Degajă un miros plăcut. Nu lasă urme deci nu este necesară ștergerea suprafețelor după utilizarea produsului.

ATENȚIE: H228 – Solid inflamabil. H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.

P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scantei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis.

P233 – Păstrați recipientul închis etanș. P280 – Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a ochilor. P305+P351+P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P337+P313 – Dacă iritarea ochilor persistă, consultați medicul.

P501 – Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările naționale în vigoare. Pentru mai multe informații consultați fișa cu date de securitate disponibilă pe website.

Eliminați acest produs cu respectarea normelor naționale și regionale în vigoare, respecti legea 211/2011 privind regimul deșeurilor. Cod deșeurilor EWC nr. 070699 (Grup: deșeurilor din categoria MFSU a grăsimilor, produselor grase, săpunurilor, detergenților, dezinfectanților și cosmeticilor. Recipientele goale pot fi încadrate în categoria gunoiului menajer sau reciclate după curățarea cu apă. Recipientele se vor manipula în aceleași condiții impuse pentru manipularea produsului însuși. Eliminarea ambalajului contaminat se va face conform Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. Utilizatorul este unic responsabil pentru luarea la cunoștință și respectarea acestor reglementări.