

OROLIN® Perasept – STERILIZANT LA RECE PENTRU STERILIZAREA LA RECE/ DEZINFECȚIA ÎNALTĂ A INSTRUMENTARULUI, ACCESORIILOR, MATERIALELOR REFOLOSIBILE UTILIZATE ÎN SALOANELE DE ÎNFRUMUSEȚARE

MOD DE UTILIZARE

Este un produs ce realizează sterilizarea la rece/dezinfecția înaltă a instrumentarului și accesoriilor care pătrund sau pot leza pielea sau care vin în contact cu mucoasele, cu pielea lezată, utilizate în desfășurarea activităților de manichiură, pedichiură, frizerie, activității de piercing, micropigmentare, tratament cosmetic, ex.: FORFECUȚE, CLEȘTI, BRICEGE, APARATE ȘI LAME DE RAS REFOLOSIBILE, ETC, a materialului sensibil ce nu poate fi sterilizat termic (cauciuc, latex, silicon etc.)

Deoarece acest produs conține surfactanți ce asigură un grad înalt de curățare, instrumentarul se introduce direct într-o cuvă cu capac ce conține soluție preparată de Orolin® Perasept nemaifiind necesară o imersare prealabilă în alte produse detergent-dezinfectante decât în situația în care instrumentele, accesoriile, etc. sunt extrem de contaminate. În acest caz recomandăm produsul: Oroid® Multisept Plus, Orolin® Burbath sau o a doua baie de OROLIN® Perasept.

Prepararea soluției:

1. Utilizați lingurița dozatoare din interiorul flaconului (1 linguriță dozatoare = 10 grame), dizolvând pudra de OROLIN® Perasept în **apă caldă (35-40°C)** astfel:

- pentru a obține o concentrație de 1% se adaugă 10 grame de produs (1 linguriță) în 1 litru apă de la robinet și se lasă să acționeze timpul necesar inactivării microorganismelor menționate mai jos (30 secunde – 30 min.)

- pentru a obține o concentrație de 2% se adaugă 20 grame de produs (2 lingurițe) în 1 litru apă de la robinet și se lasă să acționeze timpul necesar inactivării microorganismelor menționate mai jos (1 min. – 10 min.)

2. Amestecați bine până când pudra se dizolvă complet.

3. Închideți flaconul ce conține pudra imediat după fiecare utilizare!

4. Instrumentarul/accesoriile trebuie să fie complet imersate în soluție, să nu rămână nicio parte a instrumentarului neacoperită!

5. Se lasă să acționeze soluția conform recomandărilor producătorului:

Bactericid, bacterii rezistente la antibiotice	1%-10 minute	2%-1 minut
Levuricid, fungicid, tuberculocid, micobactericid	1%-30 minute	2%-10 minute
Ciuperci rezistente la antibiotice	1%-30 minute	2%-10 minute
Sporicid	1%-30 minute	2%-10 minute
Virusuri cu înveliș	1%-15 minute	2%-1 minut
Coronavirus, Herpes simplex, Vaccinia virus	1%- 5 minute	2%- 1minut
Virusuri fără înveliș	1%-15 minute	2%- 5 minute
Adenovirus , norovirus	1%- 30 secunde	
Poliovirus	1%- 5 minute	2%-1 minut
Poliomavirus	1%-15 minute	2%-5 minute

Conform normelor europene: EN 1040, EN 1275, EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 14561, EN 14562, EN 14347, EN 14348, EN 14563, EN 14476, EN 14885.

6. La terminarea operațiunii, îndepărtați obiectele din soluție în condiții aseptice și clătiți cu apă sterilă.

7. Soluția preparată se va utiliza maximum 24 ore de la preparare.

8. OROLIN Perasept prezintă o excelentă compatibilitate cu materialele, soluția preparată este inodoră și este ușor biodegradabilă!

9. Soluția face puțină spumă și se dizolvă complet în apă, fiind extrem de eficientă la sterilizarea la rece/dezinfecția înaltă a instrumentarului cu canale înguste, îmbinări, permițând soluției să pătrundă în zonele cele mai greu accesibile!

Manipularea produsului se va face prin utilizarea mănușilor de protecție!

SE INTERZICE AMESTECUL SOLUȚIEI CU ALTE PRODUSE!

PRECAUȚII

Pericol: H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. H302 Nociv în caz de înghițire. H318 Provoacă leziuni oculare grave. P210 A se păstra departe de surse de căldură/scânței/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. P220.2 A se păstra departe de materiale combustibile. P280.1 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție și echipament de protecție a ochilor. P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P501 Eliminați conținutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

Utilizați produsele dezinfectante în siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.